

Pre-OP Workflow



3DiscClinic 5.1 stellt einen neuen
Pre-Op-Workflow vor.

Die Pre-OP Schritt-für-Schritt-geführte Scan-Sequenz umfasst jetzt:

- Oberkiefer Pre-OP scannen.
- Unterkiefer Pre-OP scannen.
- Biss-Scans auf beiden Seiten aufnehmen, um sicherzustellen, dass das Labor präzise vertikale Dimensionen (VD) erhält – basierend auf der Prothese.

Nach den Biss-Scans:

- Prothese aus beiden Kiefern entfernen.
- Das System setzt sich automatisch zurück, um ein neues Scannen von Anfang an zu ermöglichen.
- Oberkiefer final scannen.
- Unterkiefer final scannen.

Nach Abschluss:

Die Final-Scans werden automatisch mit den Pre-OP-Scans ausgerichtet und abgeglichen, um Konsistenz und höchste Präzision sicherzustellen.

An das Labor senden



365 Herndon Pkwy #18
Herndon, VA 20170,
USA

1 place de la Pyramide
92 800 Puteaux
France

info@3disc.com
www.3DISC.com